



骨导引针

中文使用说明书

PKGI-010116-B

Effective: 2021/12 | © 2021 Acumed® LLC

使用说明书

骨导引针

使用信息

Acumed可重复使用手术器械及配件可用于各种手术技术和植入物系统。每次使用后，务必进行适当护理和检查。

许多Acumed器械及配件可供重复使用；然而，其使用寿命周期有限。每次使用前和使用后都必须检查是否存在锐缘、磨损、损坏、腐蚀，以及是否正确清洁和连接机制的完好性。

适用范围

用于在骨折手术过程中牵引、导引或固定。

储存条件

干燥，室温条件下储存。

避免阳光直射。

灭菌情况

产品为非灭菌提供。使用前必须灭菌。

使用动力空气移除（预真空）高压灭菌器在 132°C 下灭菌 4 分钟。

► 不建议采用重力置换灭菌。

► 不建议采用立即使用（闪蒸）灭菌。

灭菌参数仅适用于根据这些说明进行清洁的器械。

灭菌过程中建议：

► 必须拆卸器械组件

► 移动器械必须打开至中间位置

► 器械不得接触其他器械

► 盲孔必须朝下

► 空心器械必须成角度放置

► 不得堵塞孔

► 切勿堆叠器械托盘或篮筐

提示

使用前查阅使用手册或外标签。

使用前检查有无断裂和损坏。

注意事项

该产品不可用于其预期用途之外的使用目的。

勿施加强大外力。

为了安全有效地使用Acumed器械，外科医师必须熟悉该器械和其使用方法，以及建议的外科技术。

产品存放应避免过大负载。

重新使用前，必须彻底清洗Acumed器械及配件。完成手术后应立即清洗可重复使用的器械或附件。擦除多余血渍和碎屑，避免其干结在器械上。

对于暴露的弹簧、线圈及活动部件 - 应使用大量清洁剂冲洗其缝隙，清洁其中污垢。

使用硬毛刷清洁器械表面，除去其表面和缝隙的所有可见污渍。

使用硬毛刷清洁弯曲活动区域表面。边刷边旋转该部件，确保清洁到所有缝隙。

警示

当器械负载、速度或密质骨过度时，器械会发生断裂或损坏。患者务必谨慎，最好以书面形式了解上述类型器械相关风险。

本产品为医疗器械。

生产日期：见标签

使用期限：见标签

编制日期：2016-07-31

修订日期：2017-11-30，2019-07-09，2019-11-07

附录A

型号	描述	材料
80100100	骨导引针	316L不锈钢
80100101	骨导引针	316L不锈钢
80100102	骨导引针	316L不锈钢
80100103	骨导引针	316L不锈钢
35-0002	骨导引针	316L不锈钢
35-0003	骨导引针	316L不锈钢
35-0006	骨导引针	316L不锈钢
35-0008	骨导引针	镍钛合金
35-0009	骨导引针	镍钛合金
35-0011	骨导引针	钛合金
35-0015	骨导引针	316L不锈钢
80-0248	骨导引针	316L不锈钢
80-0323	骨导引针	17-4不锈钢
80-0328	骨导引针	316L不锈钢
80-0329	骨导引针	316L不锈钢
80-0413	骨导引针	316L不锈钢
80-0470	骨导引针	316L不锈钢
80-0471	骨导引针	316L不锈钢
80-0688	骨导引针	17-4不锈钢
80-0950	骨导引针	316L不锈钢
80-0970	骨导引针	316L不锈钢
80-0971	骨导引针	316L不锈钢
80-1140	骨导引针	316L不锈钢
80-1394	骨导引针	316L不锈钢
80-1395	骨导引针	316L不锈钢
80-1524	骨导引针	316L不锈钢
80-1525	骨导引针	316L不锈钢
80-1595	骨导引针	316L不锈钢
80-1759	骨导引针	316L不锈钢
80-1878	骨导引针	316L不锈钢
80-2012	骨导引针	316L不锈钢
80-2039	骨导引针	316L不锈钢
80-2430	骨导引针	316L不锈钢
80-2533	骨导引针	316L不锈钢
80-2535	骨导引针	316L不锈钢
AT-7060	骨导引针	17-4不锈钢
ATM-060	骨导引针	17-4不锈钢
MS-PIN20	骨导引针	316L不锈钢
MS-PIN28	骨导引针	316L不锈钢
PL-PTACK	骨导引针	316L不锈钢
WN-1104ST	骨导引针	钛合金镍钛记忆合金
WN-2020	骨导引针	钛合金镍钛记忆合金
WN-2020ST	骨导引针	钛合金镍钛记忆合金
WS-0704ST	骨导引针	316L不锈钢
WS-0706ST	骨导引针	316L不锈钢
WS-0906ST	骨导引针	316L不锈钢
WS-1106DT	骨导引针	316L不锈钢
WS-1106ST	骨导引针	316L不锈钢
WS-1406ST	骨导引针	316L不锈钢
WS-1407ST	骨导引针	316L不锈钢
WS-1504STT	骨导引针	316L不锈钢
WS-1505ST	骨导引针	316L不锈钢
WS-1606DT	骨导引针	316L不锈钢
WS-1607ST	骨导引针	316L不锈钢
WS-1609ST	骨导引针	316L不锈钢
WS-1609STT	骨导引针	316L不锈钢
WS-2009ST	骨导引针	316L不锈钢
WS-2020	骨导引针	316L不锈钢
WS-2408ST	骨导引针	316L不锈钢
WS-2408STT	骨导引针	316L不锈钢
WS-2409ST	骨导引针	316L不锈钢
WS-2409STT	骨导引针	316L不锈钢
WT-0906STT	骨导引针	钛合金
WT-1606STT	骨导引针	钛合金