

# 骨膜剥离器

中文使用说明书

**PKGI-010121-B**

Effective: 2022/01 | © 2022 Acumed® LLC

## 使用说明书

### 骨膜剥离器

#### 使用信息

Acumed可重复使用手术器械及配件可用于各种手术技术和植入物系统。每次使用后，务必进行适当护理和检查。

许多Acumed器械及配件可供重复使用；然而，其使用寿命周期有限。每次使用前和使用后都必须检查是否存在锐缘、磨损、损坏、腐蚀，以及是否正确清洁和连接机制的完好性。

#### 适用范围

用于剥离附着于骨面上的骨膜及软组织。

#### 储存条件

干燥，室温条件下储存。

避免阳光直射。

#### 灭菌情况

产品为非灭菌提供。使用前必须灭菌。

使用动力空气移除（预真空）高压灭菌器在 132°C 下灭菌 4 分钟。

▶ 不建议采用重力置换灭菌。

▶ 不建议采用立即使用（闪蒸）灭菌。

灭菌参数仅适用于根据这些说明进行清洁的器械。

灭菌过程中建议：

▶ 必须拆卸器械组件

▶ 移动器械必须打开至中间位置

▶ 器械不得接触其他器械

▶ 盲孔必须朝下

▶ 空心器械必须成角度放置

▶ 不得堵塞孔

▶ 切勿堆叠器械托盘或篮筐

#### 提示

使用前查阅使用手册或外标签。

使用前检查有无断裂和损坏。

#### 注意事项

该产品不可用于其预期用途之外的使用目的。

勿施加强大外力。

为了安全有效地使用Acumed器械，外科医师必须熟悉该器械和其使用方法，以及建议的外科技术。

产品存放应避免过大负载。

重新使用前，必须彻底清洗Acumed器械及配件。完成手术后应立即清洗可重复使用的器械或附件。擦除多余血渍和碎屑，避免其干结在器械上。

对于暴露的弹簧、线圈及活动部件 - 应使用大量清洁剂冲洗其缝隙，清洁其中污垢。

使用硬毛刷清洁器械表面，除去其表面和缝隙的所有可见污渍。

使用硬毛刷清洁弯曲活动区域表面。边刷边旋转该部件，确保清洁到所有缝隙。

#### 警示

当器械负载、速度或密质骨过度时，器械会发生断裂或损坏。患者务必谨慎，最好以书面形式了解上述类型器械相关风险。

## 本产品为医疗器械。

生产日期：见标签

使用期限：见标签

编制日期：2016-05-31

修订日期：2017-11-30，2019-07-09，2019-11-08

### 附录A

型号	描述	材料
80-0693	骨膜剥离器	符合 DIN EN 10088-3标准的1.4034 SS
80-1060	骨膜剥离器	符合 ASTM D5205标准的 Ultem 1000 Natural
80-1144	骨膜剥离器	符合 DIN EN 10088-3标准的1.4034 SS
MS-46211	骨膜剥离器	符合 DIN EN 10088-3标准的1.4034 SS
MS-46212	骨膜剥离器	符合 DIN EN 10088-3标准的1.4034 SS
MS-46213	骨膜剥离器	符合 DIN EN 10088-3标准的1.4034 SS
MS-57614	骨膜剥离器	符合 DIN EN 10088-3标准的 1.4021 SS