

骨测量器

中文使用说明书

PKGI-010124-B

Effective: 2022/01 | © 2022 Acumed® LLC

使用说明书

骨测量器

使用信息

Acumed可重复使用手术器械及配件可用于各种手术技术和植入物系统。每次使用后，务必进行适当护理和检查。

许多Acumed器械及配件可供重复使用；然而，其使用寿命周期有限。每次使用前和使用后都必须检查是否存在锐缘、磨损、损坏、腐蚀，以及是否正确清洁和连接机制的完好性。

适用范围

用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。

储存条件

干燥，室温条件下储存。

避免阳光直射。

灭菌情况

产品为非灭菌提供。使用前必须灭菌。

使用动力空气移除（预真空）高压灭菌器在 132°C 下灭菌 4 分钟。

► 不建议采用重力置换灭菌。

► 不建议采用立即使用（闪蒸）灭菌。

灭菌参数仅适用于根据这些说明进行清洁的器械。

灭菌过程中建议：

► 必须拆卸器械组件

► 移动器械必须打开至中间位置

► 器械不得接触其他器械

► 盲孔必须朝下

► 空心器械必须成角度放置

► 不得堵塞孔

► 切勿堆叠器械托盘或篮筐

提示

使用前查阅使用手册或外标签。

使用前检查有无断裂和损坏。

注意事项

该产品不可用于其预期用途之外的使用目的。

勿施加强大外力。

为了安全有效地使用Acumed器械，外科医师必须熟悉该器械和其使用方法，以及建议的外科技术。

产品存放应避免过大负载。

重新使用前，必须彻底清洗Acumed器械及配件。完成手术后应立即清洗可重复使用的器械或附件。擦除多余血渍和碎屑，避免其干结在器械上。

对于暴露的弹簧、线圈及活动部件 - 应使用大量清洁剂冲洗其缝隙，清洁其中污垢。

使用硬毛刷清洁器械表面，除去其表面和缝隙的所有可见污渍。

使用硬毛刷清洁弯曲活动区域表面。边刷边旋转该部件，确保清洁到所有缝隙。

警示

当器械负载、速度或密质骨过度时，器械会发生断裂或损坏。患者务必谨慎，最好以书面形式了解上述类型器械相关风险。

本产品为医疗器械。

生产日期：见标签

使用期限：见标签

编制日期：2016-07-31

修订日期：2017-11-30, 2019-11-08

附录A

型号	描述	材料
30100105	骨测量器	17-4不锈钢
30100109	骨测量器	17-4不锈钢
80-0099	骨测量器	T6铝合金
80-0357	骨测量器	17-4不锈钢
80-0584	骨测量器	T6铝合金
80-0585	骨测量器	T6铝合金
80-0623	骨测量器	17-4不锈钢
80-0643	骨测量器	17-4不锈钢
80-0664	骨测量器	17-4不锈钢
80-0726	骨测量器	316L不锈钢
80-0832	骨测量器	T6铝合金
80-0992	骨测量器	17-4不锈钢
80-0994	骨测量器	17-4不锈钢
80-0996	骨测量器	T6铝合金
80-1134	骨测量器	不锈钢
80-1356	骨测量器	17-4不锈钢
80-1523	骨测量器	塑料
80-1581	骨测量器	T6铝合金
80-1583	骨测量器	T6铝合金
80-1585	骨测量器	T6铝合金
80-1617	骨测量器	17-4不锈钢
80-1680	骨测量器	塑料
80-1776	骨测量器	17-4不锈钢
80-1801	骨测量器	17-4不锈钢
80-1879	骨测量器	T6铝合金
80-1954	骨测量器	17-4不锈钢
80-2016	骨测量器	17-4不锈钢
80-2080	骨测量器	T6铝合金
80-2496	骨测量器	17-4不锈钢
AM-5020	骨测量器	T6铝合金
AP-0204	骨测量器	17-4不锈钢
AP-0402	骨测量器	17-4不锈钢
AP-67004	骨测量器	17-4不锈钢
AP-67005	骨测量器	17-4不锈钢
AT-7010	骨测量器	T6铝合金
AT2-0402	骨测量器	17-4不锈钢
AT2-SMCZ	骨测量器	塑料
ATM-070	骨测量器	T6铝合金
ATM-073	骨测量器	T6铝合金
ATM-075	骨测量器	17-4不锈钢
FA-9010	骨测量器	T6铝合金
HR-3102	骨测量器	17-4不锈钢
HR-3104	骨测量器	17-4不锈钢
HR-5102	骨测量器	17-4不锈钢
HR-SG50	骨测量器	17-4不锈钢
MS-1030	骨测量器	不锈钢
MS-9020	骨测量器	不锈钢
MS-9022	骨测量器	不锈钢
MS-DG23	骨测量器	17-4不锈钢
MS-DRPB	骨测量器	17-4不锈钢
MTP-L250	骨测量器	T6铝合金
MTP-S250	骨测量器	T6铝合金
TR-TG01	骨测量器	T6铝合金
TR-TG02	骨测量器	17-4不锈钢
TR-TGA06	骨测量器	17-4不锈钢

备案凭证编号: 国械备20161675

产品名称: 骨测量器

型号/规格: 见附录 A

注册人及生产企业信息

注册人及生产企业名称: 艾克曼有限公司 Acumed LLC

注册人地址/生产地址: 5885 NE Cornelius Pass Road, Hillsboro, OR 97124

注册人联系方式: 1-503-627-9957/+1-888-627-9957

中华人民共和国境内代理人/售后服务机构信息

代理人/售后服务机构名称: 艾克曼（北京）咨询有限公司

代理人地址: 北京市海淀区知春路6号（锦秋国际大厦）6号楼12层A06室

代理人联系方式: 010-82001303

邮编: 100088